


1 TERÁPIA KIVÁLASZTÁSA



2 Tartozékok csatlakoztatása

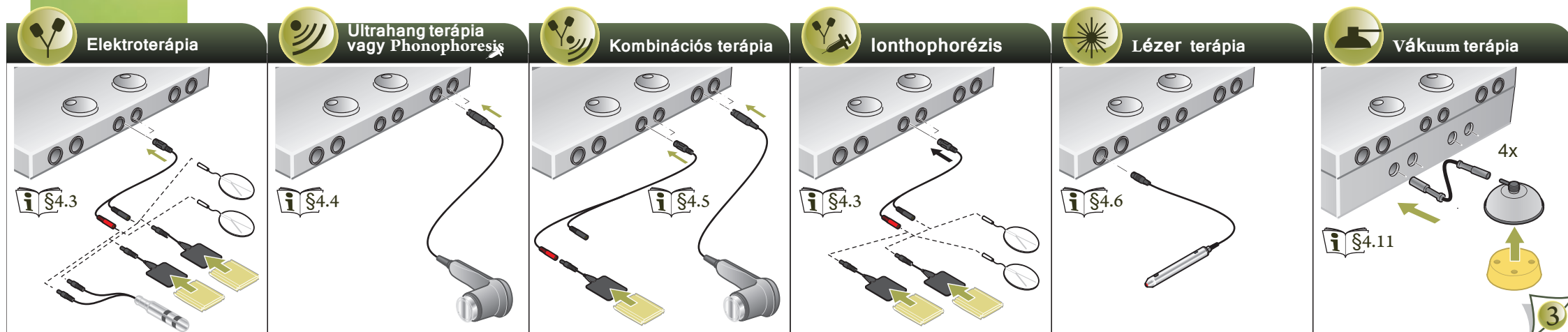



Gymna 400 series

3 BEÁLLÍTÁS/ TERÁPIA BEÁLLÍTÁS NÉZET

Főmenü

Terápia beállítások változtatása

VISSZA

? Help



i Terápia információ



Elektroda felhelyezés 3D képek



Intenzitás csatorna A Aktív kezelések leállítása


Program tárolása

Ultraszong kontaktus

jó
rossz

4 Terápia indítása

Forgassa el az A vagy B gombot az indításhoz vagy állítsa be az intenzitást

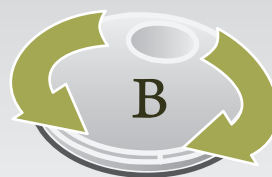

Ellenőrizze a páciens reakcióját a kezelés alatt!

BASIC LEGEND

- Polaritás kijelzés Piros-
- Polaritás kijelzés Piros+
- Váltakozó polaritás
- mA csúcs
- Volt csúcs
- Constant Current vagy Constant Voltage

- US head, ERA 4 cm²
- US head, ERA 1 cm²
- Intenzitás W/cm²
- Csúcs kimeneti energia W
- Kitöltési tényező 10%
- Kitöltési tényező 100%

- Clusterprobe
- Monoprobe
- Lézer emisszió
- Javasolt energia alkalmazása
- Totál alkalmazott energia
- Átlag teljesítmény beállítása

ref.340.494 | ELAL016-GA100-V11